

ROLLING KERRISON

—— ローリング ケリソン ——



— 特長 —

MERIT

Merit 01

シャフト部を回転させることで、刃の向きを7方向に設定することが可能。

Merit 02

Schwarzコーティングにより、切れ味の耐久性が向上。ハレーションも抑制。

Merit 03

シャフトとハンドルが分離出来るため、使用後に付着した汚れの洗浄が容易。




シャフト



ハンドル

使用方法

1 シャフトとハンドルの装着

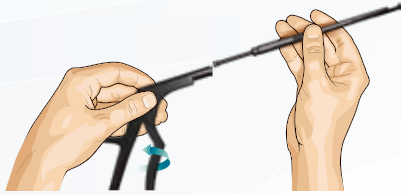

①シャフトの金色の線とハンドルの金色の線を合わせ挿入します。



②シャフトを押し込みながら矢印の方向に回転させ装着します。

2 シャフトとハンドルの分離



①シャフトを押し込みながら、矢印の方向に回転させ、シャフトの金色の線とハンドルの金色の線を合わせると分解できます。

3 シャフトの分解



①シャフトの最後部のネジを緩め、内筒とスプリングを外します。



②先端のT字溝の上部を持ち上げ外します。

※洗浄・滅菌は、4つのパーツに分解して行なうことが可能です。

No.	カタログ番号	商品名	先端形状	先端幅	シャフト長	イジェクター	JANコード
1	52-401-00B	ローリングケリソン ハンドル	—	—	—	—	4545428031367
2	52-401-01/18TP/PFB	ローリングケリソン シャフト	40°	1mm	180mm	有	4545428031374
3	52-401-02/18TP/PFB			2mm*			4545428031381
4	52-401-03/18TP/PFB			3mm			4545428031398
5	52-401-04/18TP/PFB			4mm			4545428031404
6	52-401-05/18TP/PFB			5mm			4545428031411
7	52-401-01TP/PFB			1mm	200mm		4545428031428
8	52-401-02TP/PFB			2mm*			4545428031435
9	52-401-03TP/PFB			3mm			4545428031442
10	52-401-04TP/PFB			4mm			4545428031459
11	52-401-05TP/PFB			5mm	4545428031466		
12	52-401-01/23TP/PFB			1mm	230mm		4545428031473
13	52-401-02/23TP/PFB	2mm*	4545428031480				
14	52-401-03/23TP/PFB	3mm	4545428031497				
15	52-401-04/23TP/PFB	4mm	4545428031503				
16	52-401-05/23TP/PFB	5mm	4545428031510				
17	52-401-01/25TP/PFB	1mm	250mm	4545428031527			
18	52-401-02/25TP/PFB	2mm*		4545428031534			
19	52-401-03/25TP/PFB	3mm		4545428031541			
20	52-401-04/25TP/PFB	4mm		4545428031558			
21	52-401-05/25TP/PFB	5mm	4545428031565				
22	52-401-01/28TP/PFB	1mm	280mm	4545428031572			
23	52-401-02/28TP/PFB	2mm*		4545428031589			
24	52-401-03/28TP/PFB	3mm		4545428031596			
25	52-401-04/28TP/PFB	4mm		4545428031602			
26	52-401-05/28TP/PFB	5mm	4545428031619				
27	52-401-01/30TP/PFB	1mm	300mm	4545428031626			
28	52-401-02/30TP/PFB	2mm*		4545428031633			
29	52-401-03/30TP/PFB	3mm		4545428031640			
30	52-401-04/30TP/PFB	4mm		4545428031657			
31	52-401-05/30TP/PFB	5mm	4545428031664				

*公称値

- 販売名：骨鉗子
- 届出番号：14B1X00016000016
- 医療機器分類：一般医療機器(クラスI)
- 一般的名称：手術用骨鉗子

製品により、受注発注となります。納期は担当営業にご確認ください。
本製品をご使用の際は、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。
仕様・外觀につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】
PIOLAX 株式会社 パイオラックス メディカル デバイス
〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】
TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560