



W Spiral Catheter

【ノンテーパタイプ】

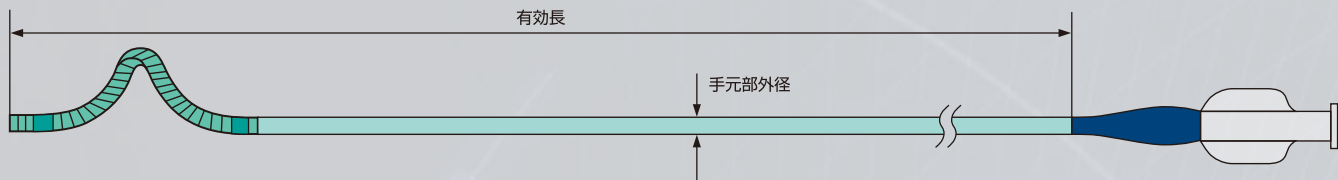

【テーパタイプ】

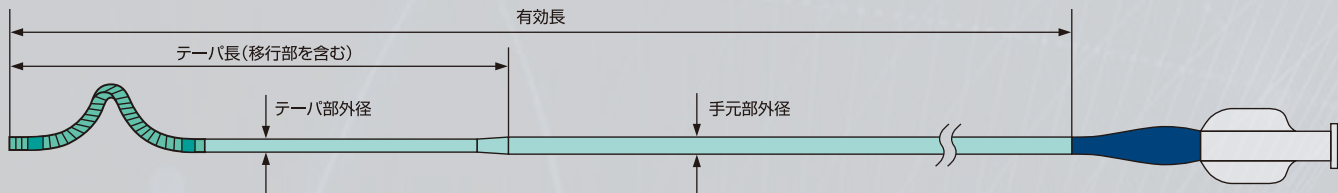

製品規格


カタログ番号	テーパ部外径	手元部外径	テーパ長	適合ガイドワイヤ 最大外径	有効長	JANコード
C5F9SF-W080S	—	1.67 mm (5 Fr.)	—	0.89 mm (0.035 inch)	80 cm	4545428004385
C4T9SF1-W080S	1.10 mm (3.3 Fr.)	1.70 mm (5 Fr.)	10 cm	0.64 mm (0.025 inch)		4545428007096
C4T9SF-W080S			23 cm			4545428006068
C3T8SF1-W080S	10 cm		0.41 mm (0.016 inch)	4545428004408		
C3T8SF-W080S	23 cm			4545428004392		
C3T8SF3-W090SF	30 cm			90 cm		4545428005801
C3F8ST-W120S※1	—	0.90 mm (2.7 Fr.)	—	120 cm	4545428005641	
C5FP-SH065RL※2,※3	—	1.72 mm (5 Fr.)	—	0.97 mm (0.038 inch)	65 cm	4545428009762

※1 C3F8ST-W120S コアキシャルカテーテル

※2 C5FP-SH065RL コアキシャルカテーテル用親力カテーテル シェファードフック形状

※3 カットプレートは付属されていません。

G Spiral Catheter

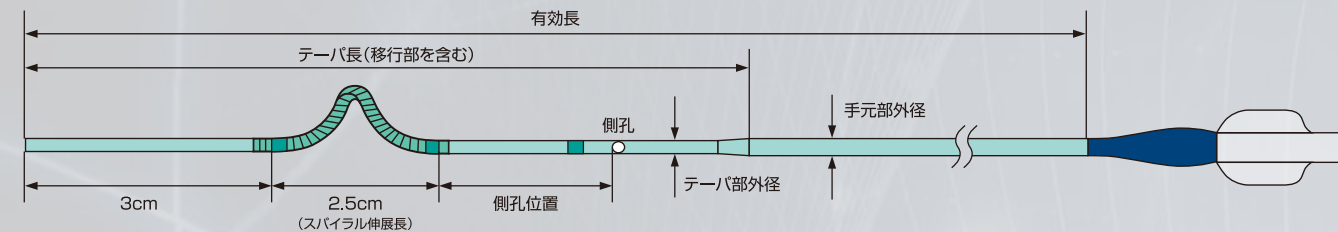

製品規格

カタログ番号	外径 (テーパ部 / 手元部)	テーパ長	側孔 (2ndマーカ部より)	適合ガイドワイヤ 最大外径	有効長	JANコード
GS4T2-80-3	1.30 mm / 1.70 mm (4 Fr. / 5 Fr.)	20 cm	3 cm	0.89 mm (0.035 inch)	80 cm	4545428016081
GS4T2-80-5			5 cm			4545428016098

■販 売 名：パイオラックス Wスパイラルカテーテル

■承 認 番 号：21100BZZ00205000

■医療機器分類：高度管理医療機器(クラスⅣ)

■一 般 的 名 称：体内植込み用カテーテル

■エチレンオキシドガス滅菌済み

本品は再使用不可のディスposable製品です。

本製品をご使用の際には、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。

仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】



株式会社 パイオラックス メディカル デバイス

〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】

TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560

C-WS1705第3版SW

W SPIRAL

PIOLAX W spiral catheter

パイオラックス W スパイラルカテーテル

G SPIRAL




PIOLAX **W** spiral catheter


各種留置法に対応した血管内留置カテーテル

- ディスロケーションの低減効果(先端形状記憶合金コイル部)
- 良好な視認性と挿入性
- 表面特殊コーティング(PVPコーティング)

■ 製品ラインナップ(先端部拡大)

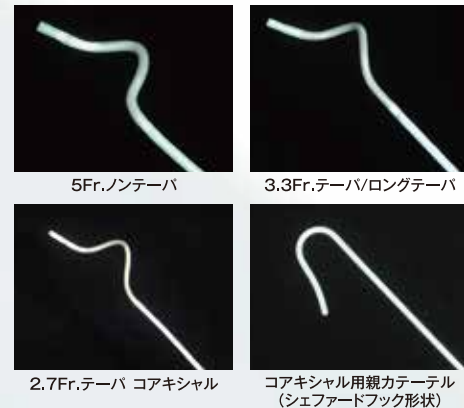


■ 各種留置法に対応

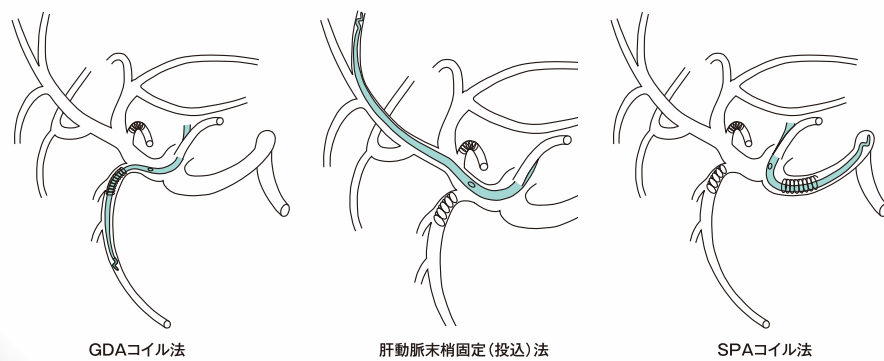


※参考書籍「リザーバー療法」編集:リザーバー研究会、P67、南江堂


カットプレート(側孔作製器具)を標準付属

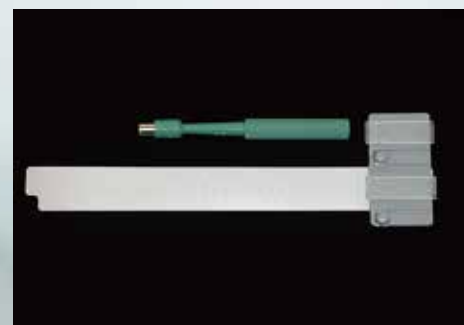

1
側孔作製器具の
全体写真
上:生検トレパン
下:スケール
右:カットプレート

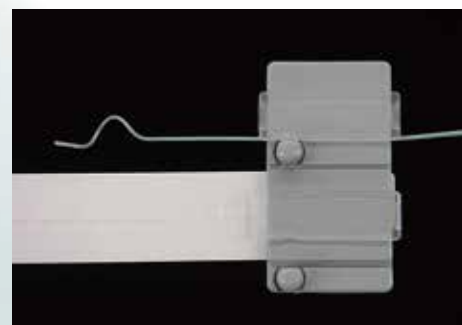

2
カテーテル外径に適
合したカットプレ
ートの溝に、カテ
ーテルをしっかりと挿入
します。カテーテル
に浮きがないことを
確認後、蓋をスライ
ドさせます。

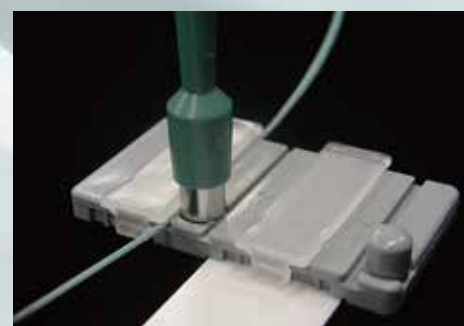

3
生検トレパンをカッ
トプレートのガイド
ピンに沿わせ垂直に
挿入します。この時、
左右に回転させなが
ら軽く押し込んで
いきます。



4
生検トレパンを軽く
押さえながら蓋をス
ライドさせ、カテ
ーテルをゆっくりと持
ち上げます。側孔が
作製されていると、カ
テーテルがスムーズ
にはずれます。

併用推奨ポート

5Fr.接続用

株式会社東機質

SOPH-A-PORT

カタログ番号	ポートサイズ
SP20030N	スタンダード
SP10030N	ミニ

- 販 売 名: ソファポート
- 承 認 番 号: 21000BZY00120000
- 製造販売元: 株式会社TKB
- 販 売 元: 株式会社東機質



コアキシャル専用

ニプロ株式会社

ニプロカテーテルアクセスP

カタログ番号

CAS-215-PLM


- 販 売 名: カテーテルアクセスP
- 承 認 番 号: 20300BZZ00924000
- 製造販売元: ニプロ株式会社



PIOLAX **G** spiral catheter

術者によるカテーテル加工が不要な側孔付き留置カテーテル

- ディスロケーションの低減効果(先端形状記憶合金コイル部)
- 先端20cm 4Fr.テーパ(側孔遠位部マーカ付き)
- 表面特殊コーティング(PVPコーティング)

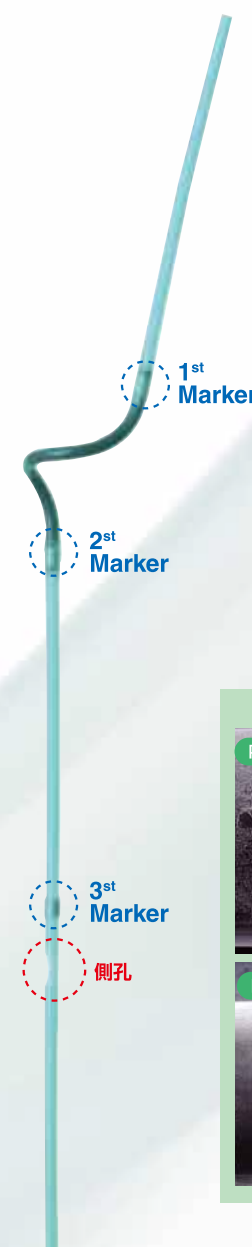

PVPコーティング





Gスパイラル症例 (GDAコイル法)

留置前造影



Replaced RHA の塞栓をし、肝動脈の一本化がされている。


0.035"親水性GWを介し、留置した直後のコイルリング操作

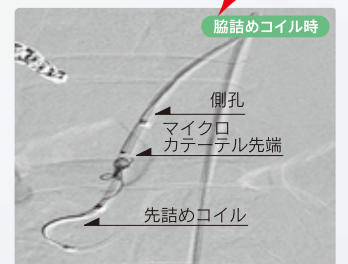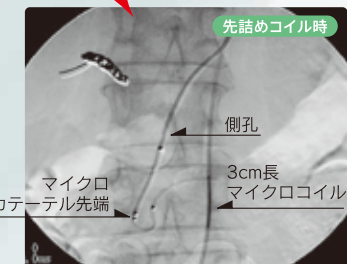

マイクロカテーテルをスパイラル形状部の2ndマーカ付近に進め、全長3cm以下のマイクロコイルをスパイラル形状部内に置く。

3rdマーカ手前の側孔からマイクロカテーテルを出し、GDAをマイクロコイルにて塞栓する。

ポート造影

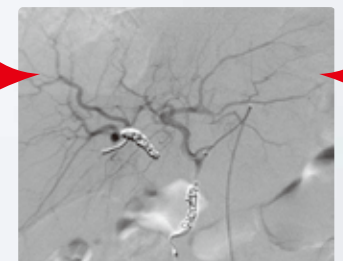

肝全体に良好な血流分布が得られている。

併用推奨ガイドワイヤ「サーフ」

- 販 売 名: バイオラックス親水性ガイドワイヤー
- 承認番号: 20800BZZ00001000

カテーテル交換をスムーズにする2種類の親水性ガイドワイヤ

- Ti-Niコア親水性ガイドワイヤ
芯線に形状記憶合金を使用した親水性ガイドワイヤです。
- ステンレスコア親水性ガイドワイヤ
シャフト剛性が高く、形状付けが可能です。挿入後の安定性が高く、サポート力もあるため、カテーテル交換をよりスムーズにします。



参考写真: 形状付けをしたステンレスコア親水性ガイドワイヤ