


Ordering Information

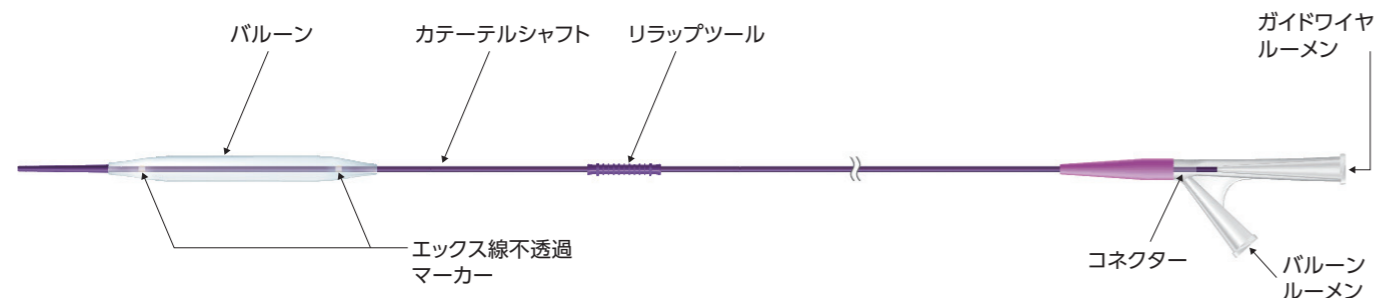

カタログ番号	有効長	バルーン径	バルーン有効長	推奨拡張圧	最大拡張圧	適合ガイドワイヤ	適合シース	JANコード
TRN35-045-4040	45 cm	4 mm	4 cm	1,216 kPa (12 atm)	2,432 kPa (24 atm)	0.889 mm (0.035 inch)	5 Fr.	4560292786700
TRN35-045-5040		5 mm						4560292786717
TRN35-045-6040		6 mm						4560292786724
TRN35-080-4040	80 cm	4 mm			2,229 kPa (22 atm)			4560292786731
TRN35-080-5040		5 mm			2,432 kPa (24 atm)			4560292786748
TRN35-080-6040		6 mm			2,229 kPa (22 atm)			4560292786755

Treno35 Balloon Compliance

圧力	kPa (atm)	810 (8)	1,013 (10)	1,216 (12)	1,419 (14)	1,621 (16)	1,824 (18)	2,027 (20)	2,229 (22)	2,432 (24)	2,634 (26)
バルーン径	4.0 mm	3.90	3.95	4.00	4.05	4.10	4.15	4.20	4.25	4.30	4.34
	5.0 mm	4.88	4.94	5.00	5.06	5.12	5.18	5.24	5.30	5.36	5.42
	6.0 mm	5.85	5.92	6.00	6.07	6.14	6.22	6.29	6.36	6.43	6.51

■ 推奨拡張圧 ■ 最大拡張圧

販売名：クアッドプロ
 承認番号：30300BZX00170000
 医療機器分類：高度管理医療機器 (クラスIV)
 一般的名称：バルーン拡張式血管形成術用カテーテル
 保険医療材料請求分類：PTAカテ・一般・標準
 セット内容：バルーンカテーテル本体、リラップツール
 エチレンオキサイドガス滅菌済

■本品は再使用不可のディスposable製品です。
 ■本製品をご使用の際は、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。
 ■仕様・外観については、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【販売元】

PIOLAX 株式会社 パイオラックス メディカル デバイス
 〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【製造販売元】

USCIジャパン株式会社
 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3丁目28番地6

【商品に関するお問い合わせ先】

TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560

※本製品につきましては、販売元もしくは取り扱い販売店までお問合せください。

Treno35

PTA BALLOON CATHETER



PIOLAX

“Train”の継承

ロングテーパーチップ効果による追従性と
拡張力(24atm)のハイパフォーマンスを実現。

Treno35
PTA BALLOON CATHETER

「屈曲蛇行した血管」、「急峻に分岐する血管」、「タイトな狭窄・閉塞部位」、「吻合部付近の病変」へ
挿入されたガイドワイヤーにスムーズに追従し、クロスする血管拡張用バルーン。

それが **Treno35** (トレノ 35) です。

Long Taper Tip



Coaxial



Trackability

- 親水性コーティングを施した30mmの柔軟なロングテーパーチップがスムーズなトラッカビリティとクロスビリティを実現します。

High Pressure

- RBP24atm*
- 12atmの幅広いワーキングレンジ
- 高剛性エラストマーを採用したノンコンプライアントバルーン
- ノンコーティングによりスリッピングを予防

Pushability

- コアキシャル構造を採用したことでシャフト剛性が強化されバルーンデリバリーをサポートします。

*6mmは22atm